

SCHEDA TECNICA BIOPSY BOX

Contenitore monouso per campioni biotici con utilizzo di formalina in sicurezza in volume da 20 ml

CE IVD

Codice CND: W01030705

TECNOBILIFE S.R.L. Via delle Corallaie, 16 Livorno 57121 info@tecnobilifesrl.com fax 05861973754

Notizie generali

Il dispositivo consente l'introduzione diretta all'interno del contenitore del materiale biotico prelevato, il distacco viene facilitato dalla presenza di soluzione tampone contenuta al suo interno in assoluta sicurezza.

Il tappo del dispositivo contiene la capsula sigillata con il reagente fissativo a base di formaldeide evitando grazie alla ghiera di sicurezza la rottura accidentale.

Chiusura del contenitore con il tappo, ruotare il tappo in senso orario sino alla rottura del sigillo di sicurezza, in questo modo la capsula viene forata e permette la discesa del liquido nel contenitore, ricostituendo la soluzione (formalina tamponata pronto uso sec. Lille al 10% V/V 4%) in totale sicurezza per l'operatore. Il volume complessivo del dispositivo è da 50 ml, volume contenitore 25 ml. La velocità di penetrazione al tessuto biologico è di 1 mm. per lato per ora; dimensione massima del campione biotico 1,2 centimetro cubo.

Caratteristiche tecniche

Il dispositivo monouso è composto:

- Capsula sigillata contenente reagente fissativo a base di formaldeide.
- Ghiera di sicurezza.
- Tappo forante.
- Contenitore con all'interno la sola soluzione tampone.
- Il dispositivo consente di svitare in sicurezza il tappo per l'inserimento del campione da analizzare, evitando grazie alla ghiera di sicurezza la rottura accidentale della capsula e conseguente discesa del liquido fissativo a base di formaldeide nel contenitore.
- provvisti di etichetta serigrafata, come previsto dal Regolamento Europeo 605/2014, che disciplinano la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi, e dal decreto legislativo n° 81/2008; *Etichettatura a norma. Simboli per dispositivi sanitari EN ISO 15223 – 1: 2012*
- forniti in scatola di cartone, adatta a garantirne l'integrità e la protezione da polvere e sporco.

I contenitori devono essere smaltiti tramite termodistruzione.

Codice Ref.	Colore	Codice RDM	Capacità	Confezione	Materiale
00022	Verde	1636319	20 ml	48 pz.	Polipropilene

TECNOBILIFE srl
Via delle Corallaie, 1
57121 Livorno

Tel. 0586 1973754
Fax 0586 1973754
info@tecnobilifesrl.com